

In'Oss™ Putty – modellierbares, vollsynthetisches Knochenersatzmaterial

Umseitig finden Sie Informationen zu Verpackungseinheiten von In'Oss™ Putty Knochenersatzmaterial mit Preisangaben sowie unser Bestellformular: Einfach ausfüllen und an uns zurückfaxen!

In'Oss™ Putty – gebrauchsfertig, direkt aus der Spritze



Produkteigenschaften:

- Formbar: lässt sich sehr gut an die Defektgeometrie anpassen
- Vollständig resorbierbar
- Wird direkt aus der Spritze appliziert – kein vorheriges Anmischen notwendig
- Osteokonduktiv
- Mikropartikelgröße: 8-200 µm
- vollsynthetisch
- Doppelt steril verpackt

In'Oss™ ist eine mikroporöse, resorbierbare, zweiphasige Calcium-Phosphat-Emulsion, aufbauend auf der bekannten MBCP™ Technologie. Entwickelt wurde dieses außergewöhnliche Knochenersatzmaterial, um die klinische Handhabung während eines operativen Augmentationseingriffs zu erleichtern: In'Oss™ passt sich an die Defektgeometrie an und bleibt volumenstabil.

In'Oss™ verfügt über ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen MBCP™ Mikro-Partikeln und einem resorbierbaren Hydrogel, welches als Träger fungiert und ein schnelles Knochenwachstum begünstigt. Das Material resorbiert stufenweise und wird durch neuen, vitalen Knochen ersetzt.

In'Oss™ ist gebrauchsfertig und kann direkt aus der Spritze in den Knochendefekt appliziert werden.

Verpackungseinheit: 2 x 0,5 ml in Spritzen

Indikationen:

- Sinuslift/Sinusbodenelevation
- Auffüllen von Extraktionsalveolen/Socketpreservation
- Auffüllen von periimplantären und parodontalen Defekten



▶▶▶ Preise und Verpackungseinheiten auf der Rückseite

Anwendungshinweise:

In'Oss™ ist doppelt steril verpackt. Öffnen Sie die Blisterverpackung und entnehmen die enthaltene Spritze.

In'Oss™ kann direkt auf der Spritze appliziert werden – ein vorheriges Anmischen ist nicht notwendig. Wenn gewünscht kann **In'Oss™** mit autologem Knochen gemischt werden.


Es wird empfohlen, nach Einbringen des Materials den Defekt entweder mit einer Membran oder – wenn ausreichend vorhanden – der Mukosa abzudecken und speicheldicht zu vernähen.



▲ Abb. 1: Applikation von In'Oss™ direkt aus der Spritze



Hier gelangen Sie direkt zu **In'Oss™ Putty** im Webshop mit weiteren Produktinformationen

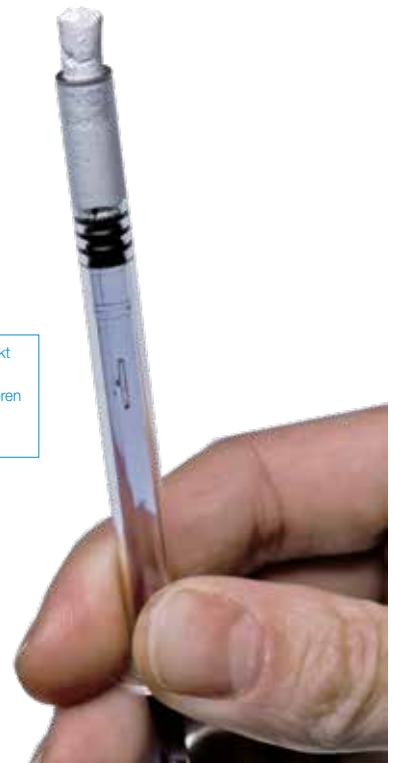

Bestellformular

Lieferung ab 199,-* Bestellwert
VERSANDKOSTENFREI

Bitte ankreuzen, ausfüllen und per Fax (+49 6172/925 81 57), Hotline (0800 6646936) oder E-Mail (bestellung@imperios.de, z.B. Foto des ausgefüllten Formulars) bestellen:

Artikel - Beschreibung	Inhalt/Pack	Artikel-Nr.	Preis	Bestellmenge
In'Oss™ Putty modellierbare Paste in Spritzen	2x 0,5 ml	MP-01-0510	144,00 €*[*]	

Hiermit bestelle ich verbindlich die in der Tabelle markierten Artikel:

Praxis _____

Praxisstempel:

Unterschrift _____

imperiOs

imperiOs GmbH
Hessenring 119-121
61348 Bad Homburg
Tel.: +49 6172/92 58 51

info@imperios.de
www.imperios-dental.de

Hotline: 0800 6646936**

**kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand.
Die Angebote sind gültig bis zum 31.12.2023. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- €* erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.