



## Verarbeitungshinweis von MBCP+ in Spritze:



1. Flüssigkeit

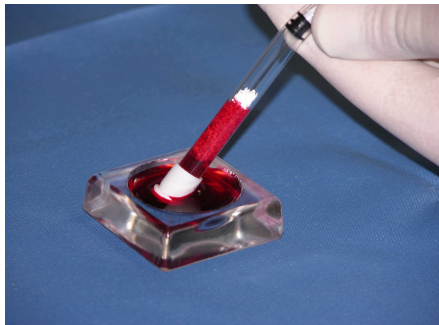

2. Überschüssige Flüssigkeit

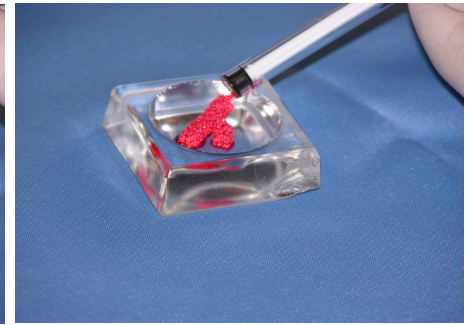

3. Kappe entfernen, Granulat

### **MBCP<sup>+</sup>**

Micro Macroporous Biphasic Calcium Phosphate

#### **Informationen zur korrekten Anwendung des synthetischen Knochenersatzmaterials MBCP+ aus der Spritze.**

**WICHTIGER HINWEIS:** Vor der Applikation des MBCP+ Materials in den aufbereiteten Defekt muss das Material entsprechend vorbereitet werden. Tauchen Sie die weiße Kappe am Ende der Spritze senkrecht in eine sterile physiologische Kochsalzlösung bzw. Patientenblut, und saugen Sie anschließend die Flüssigkeit in das Material auf. Warten Sie ca. 1 Min., bis das Material komplett von der Flüssigkeit durchdrungen worden ist. Drücken Sie die überschüssige Flüssigkeit aus der Spritze heraus. Jetzt können Sie die weiße Kappe abnehmen; achten Sie bitte darauf, dass das Material durch das Öffnen nicht herausfällt. Nach dem Öffnen können Sie das MBCP+ Granulat in den Knochendefekt einbringen. Bei Bedarf kann das Granulat mit einem sterilen Spatel vorsichtig modelliert werden. **Wichtig:** Das MBCP+ Granulat sollte nach dem Einbringen nicht gestopft werden, da sonst die Gefahr besteht, die poröse Struktur zu zerstören und somit den natürlichen Umbauprozess zu behindern. Bedecken Sie den Defekt mit einer entsprechenden Membran bzw. Periost und verschließen Sie die Wunde bakteriendicht.

Ihr imperios Team

imperios GmbH

E-Mail: [info@imperios.de](mailto:info@imperios.de)

[www.imperios.de](http://www.imperios.de)